

Instru Zym Bio-wipes

Produktinformation



Produktbeschreibung

Instru Zym Bio-wipes sind gebrauchsfertige Reinigungstücher auf Enzymbasis. Die Tücher bestehen aus 100% biologisch-abbaubarem Tuchmaterial mit optimaler Wirkstoffabgabe.

Anwendungsgebiet

Instru Zym Bio-wipes werden zur Vorreinigung von Endoskopen und medizinischem Zubehör, sowie für chirurgische und orthopädische Instrumente eingesetzt. Dabei werden grobe, organische Verschmutzungen materialschonend entfernt.

Anwendungshinweise

Das zu reinigende Instrument nach dem Einsatz schnellstmöglich mit einem Instru Zym Bio-wipes sorgfältig abwischen. Bei Bedarf mit einem neuen Tuch solange wiederholen, bis die Oberfläche optisch sauber ist. Dabei auf eine vollständige Benetzung achten. Vorzugsweise sollte die Vorreinigung mit den Instru Zym Bio-wipes vom sauberen Ende des Instrumentes zum verschmutzten Ende hin durchgeführt werden.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Produktsortiment und Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
600897	80 Tücher	Flowpack	6 x 80 Tücher



Instru Zym Bio-wipes

Produktinformation



Medizinproduktklasse

I

Inhaltsstoffe

Protease, Amylase, Lipase, nichtionische Tenside, Hilfsstoffe, Duftstoffe, gereinigtes Wasser

Chemisch-physikalische Daten

Farbe leicht gelblich
Aussehen klar
Zustand flüssig
pH-Wert (20°C) 5,5 - 6,5
Dichte (20°C) 0,9982 - 1,0082 g/ml

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit

24 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Anforderungen an die Lagerungsumgebung

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff. Beachten Sie die nachfolgenden Temperaturgrenzen für die Lagerung.

Beschreibung	Einheit	Wert
Temperaturgrenzen für die kurzzeitige Lagerung (Min. - Max.)	[°C]	0 - 40 ¹⁾
Umgebungstemperatur für die dauerhafte Lagerung gemäß Haltbarkeit (Min. - Max.)	[°C]	20 - 25

¹⁾ Eine kurzzeitige Lagerung (höchstens 24 h) bis maximal 40 °C hat keine Auswirkung auf die Wirksamkeit des Produkts.

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Internet auf unserer Homepage:

www.drdeppe.de

Spezielle Anfragen richten Sie bitte an:

info@drdeppe.de

