

Entnahmestelle von sterilfiltriertem Wasser


Bei Verwendung des AQ31F1S – Standzeit max. 31 Tage

Diese Wasserarmatur ist mit einem Pall-Aquasafe™ Sterilfilter ausgerüstet.

Der Filter schützt Sie vor Bakterien und Pilzen aus dem Leitungswasser.

Sollte der Filter nicht vorhanden sein, informieren Sie eine Pflegekraft. Ein Sicherheitsventil verhindert in diesem Fall, dass Sie ungefiltertes Wasser entnehmen können.

Damit der Filter nicht von der Außenseite her kontaminiert wird, beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise:

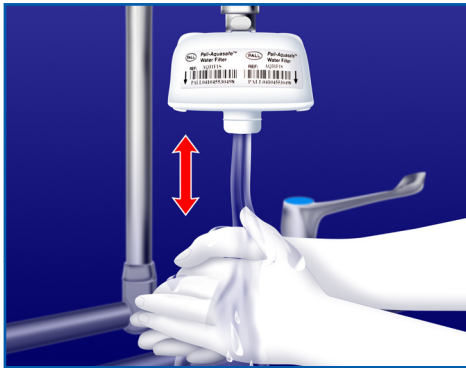

Beim Händewaschen
Sicherheitsabstand einhalten!



Filter nicht von unten berühren!



Filter nicht reinigen!



Filter nicht abbauen!

Hier keine Waschschüsseln entleeren!

Montagedatum notieren!